


Bittium HSAT™ -rekisteröinti kahdella RIP-vyöllä

Pikaopas


Tarvikkeet

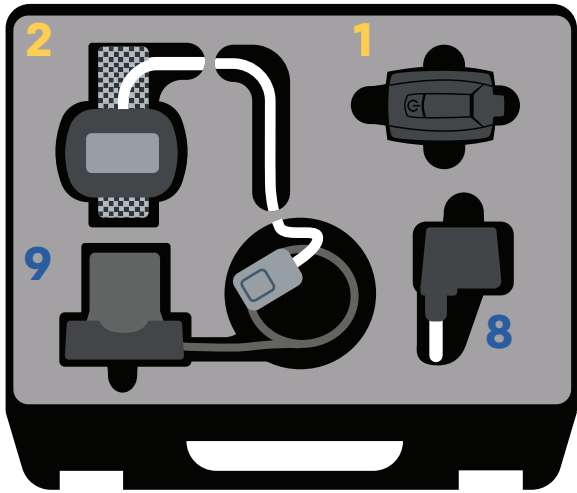

3



4

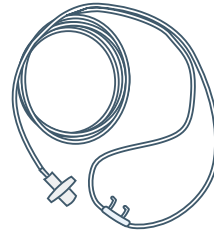


5



6



7

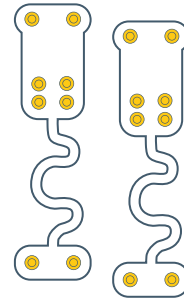

Rekisteröinnissä tarvittavat tarvikkeet:




- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Bittium Respiro™ | 5. Kaksi RIP-vyötä |
| 2. Pulssioksimetri | 6. Ihoteippi |
| 3. Pikaopas/ Huomioita ja Varoituksia | 7. Respiro™ kiinnityslevy ja varakiinnityslevy |
| 4. Nenäkanyyli | |

Älä käytä rikkoutunutta laitetta tai nenäkanyyliä, jonka suojarahkaus on avautunut.

Respiroon lataamisessa tarvittavat tarvikkeet (mikäli tarpeen):


- | |
|------------------|
| 8. Laturi |
| 9. Lataustelakka |

Rekisteröinnin aloitus

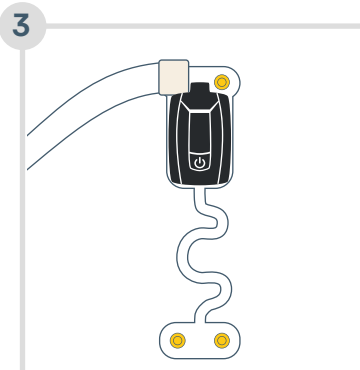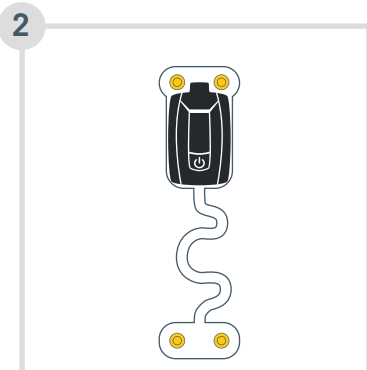
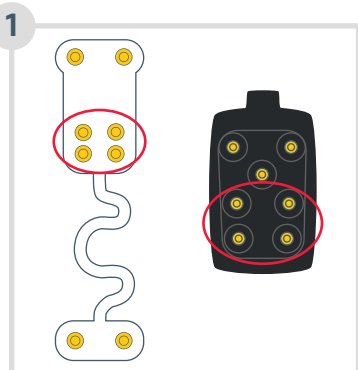


Kiinnitä RIP-vyö kiinnityslevyn kuten kuvassa.

5

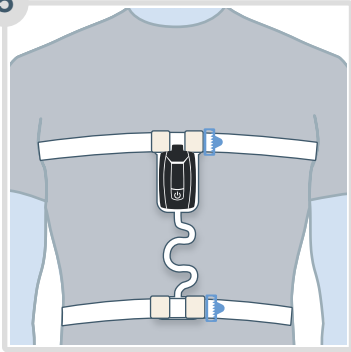


6

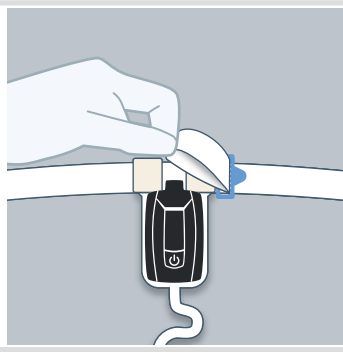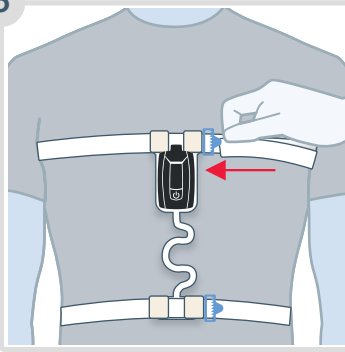


- Säädä vöitä, jos ne ovat liian löysällä.
- Varmista, että vyöt eivät mene ristiin. Yksi vyö rinnan yli ja yksi vatsan yli.

7

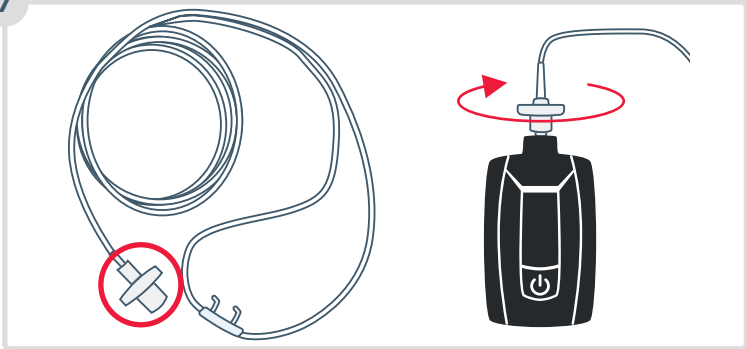


Kytke nenäkanyyli rekisteröintilaitteeseen ja pyöritä liitintä hieman myötäpäivään, kunnes liitin ottaa kiinni.

8

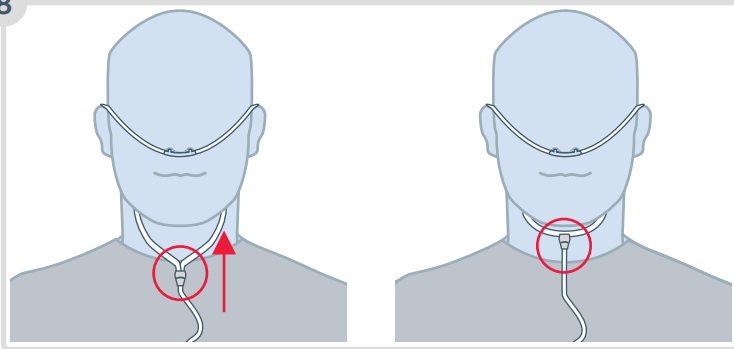


- Siirrä kiristintä kanyylia pitkin ylöspäin sopivuuden säätämiseksi.
- **Tukehtumisvaara!** Aseta nenäkanyyli huolellisesti kuvien osoittamalla tavalla.
- Jos kanyylissa on suukappale, tulee sen osoittaa suuta kohti.



9

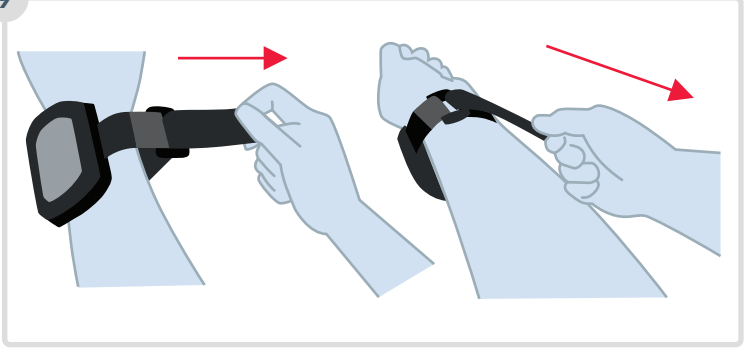


10

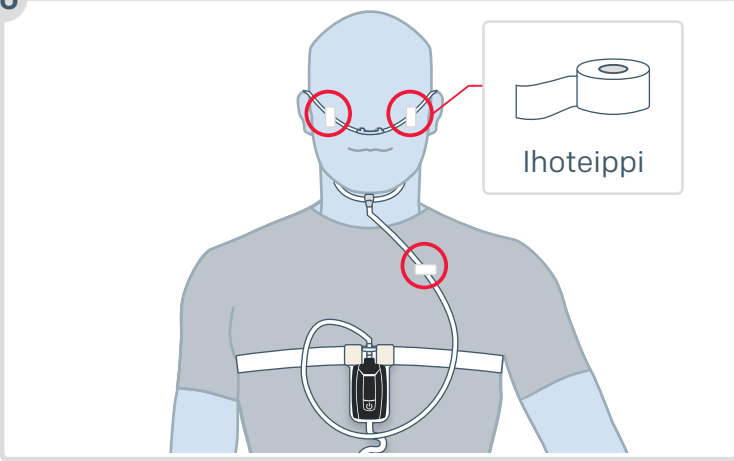


Tukehtumisvaara! Käytä teippiä nenäkanyylin kiinnittämisessä!

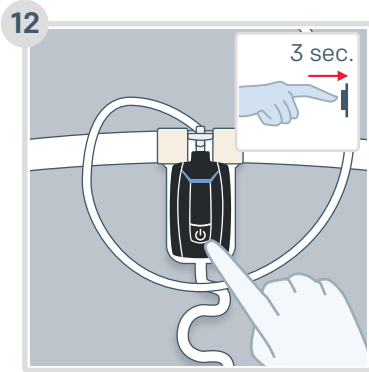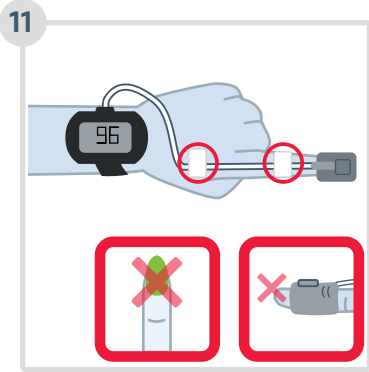


- Paina virtanappia n. 3 sekuntia, kunnes LED-valot palavat sinisenä.
- Jatka seuraavaan vaiheeseen.
- Jos tallennus on asetettu käynnistymään automaattisesti, ohita vaiheet 12 ja 13.

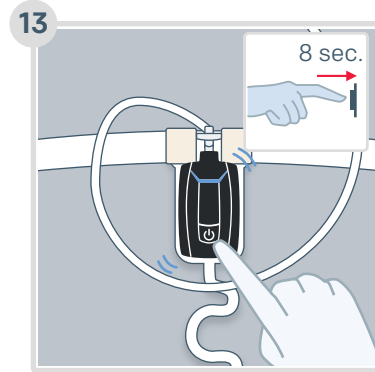

Paina virtanappia uudelleen n. 8 sekuntia, kunnes laite värähtää kerran ja LED-valot alkavat vilkkua sinisenä.

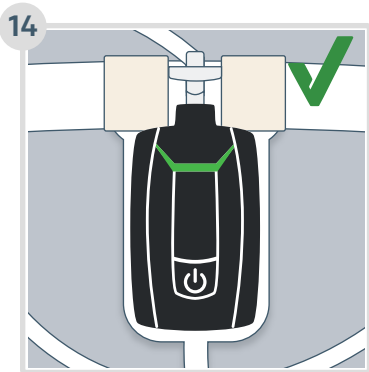


- LED-valot palavat hetken **vihreänä**, kun rekisteröinti on alkanut onnistuneesti.
- Valot sammuvat automaattisesti n. 30 sekunnin kuluttua, mikäli kaikki on OK ja olet makuulla.

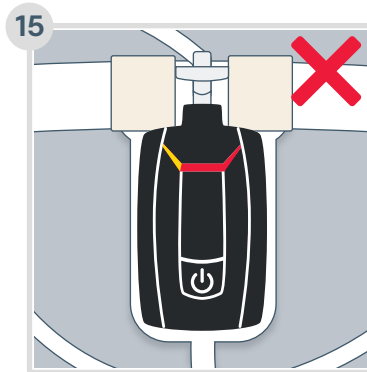


Jos yksikin LED-valo vilkkuu **punaisena** tai **keltaisena** tarkista, että merkkivaloa vastaava laitteiston osa on kytketty oikein. Selitykset merkkivaloille löytyvät **seuraavalta sivulta**.

Rekisteröinnin aikana

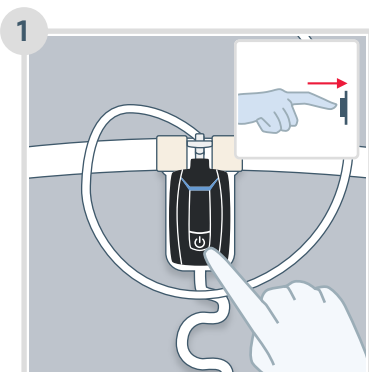

Voit painaa virtapainiketta lyhyesti merkatakseksi valveillaoloajat kuten nukkumaanmeno, WC:ssä käynti, herääminen jne. (Valinnainen)


Rekisteröinnin lopetus

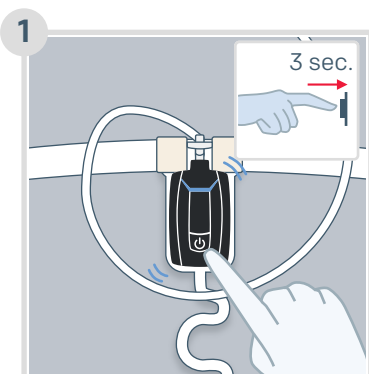

- Paina virtanäppäintä n. 3 sekuntia, kunnes laite värähtää 3 kertaa ja laitteen LED-valot syttyvät sinisenä yksitellen vasemmalta oikealle.
- Pulssioksimetri sammuu automaattisesti, kun otat sormianturin pois sormesta.

• Jos tallennus on asetettu päättymään automaattisesti, ohita vaihe 1.


- Laitteen merkkivalot palavat sinisenä 5 minuuttia, mutta voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

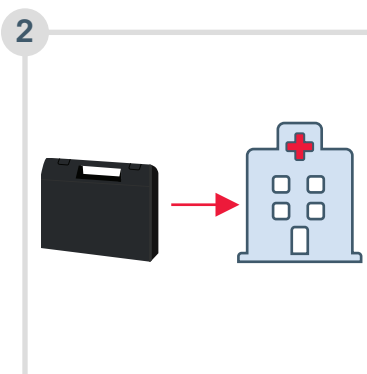

Irrota laite ja kaikki tarvikkeet itsestäsi. Pane kaikki tarvikkeet takaisin kuljetussalkkuun ja palauta se klinikallesi.

LED-merkkivalot: Respirom edestä katsottuna

Jos yksikin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena tai keltaisena tarkista, että merkkivaloa vastaava laitteiston osa on kytketty oikein. LED-valot palavat vihreänä, kun kytkennät ovat kunnossa. Vilkkuvia merkkivaloja on kaksi kuviota, ja ne näkyvät rekisteröintilaitteessa yksitellen. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseesi, jos LED-valot palavat tasaisen punaisena tai valot eivät pala ollenkaan.

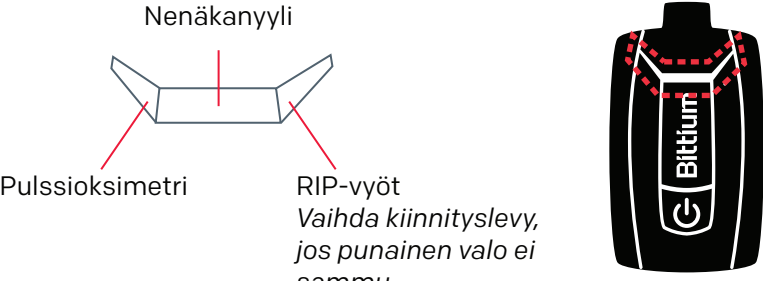 Nenäkanyyli Pulssioksimetri RIP-vyöt Vaihda kiinnityslevy, jos punainen valo ei sammu.	Esimerkki  Nenäkanyyli: OK Pulssioksimetri: Sormi ei ole pulssioksimetrin sormianturissa. RIP-vyöt: Kytchentävika
 Kytchentävika  Sormi ei ole pulssioksimetrin sormianturissa  OK	

Kytke lataustelakka ja laturi pistorasiaan ja aseta Respiro lataustelakkaan nähdäksesi akun varaustason. LED-valot ilmaisevat laitteen akun varaustason. Akun lataus on riittävä, jos vähintään kaksi vihreää LED-merkkivaloa vilkkuu tai kaikki LED-valot palavat jatkuvasti.