

Electrodo para ECG de 1 derivación Bittium MiniSnap™ Sensitive

El electrodo para ECG de 1 derivación Bittium MiniSnap™ Sensitive está destinado a utilizarse con el dispositivo para ECG Bittium Faros™ para medir las señales cardíacas (ECG).

Equipo



Bittium Faros™



Adaptador Bittium OmegaSnap™



Electrodo para ECG de 1 derivación Bittium MiniSnap™ Sensitive

¡Precaución!

- ▶ Coloque el electrodo únicamente sobre piel limpia e íntegra.
- ▶ No utilice cremas ni lociones corporales en la zona del electrodo antes de colocarlo.
- ▶ No utilice electrodos obsoletos. Compruebe la fecha en el material de embalaje.
- ▶ El electrodo es para un solo uso. Reutilizar el producto podría contaminarlo, lo que resulta en infecciones.
- ▶ Deje de utilizar el dispositivo para ECG Faros y retire el electrodo de la piel si este provoca reacciones adversas, como irritación o erupción cutánea. Si se produjese algún problema, póngase en contacto con su centro médico o persona responsable del tratamiento.
- ▶ Sustituya el electrodo si no se pega a la piel.
- ▶ Retire el electrodo de la piel después de la medición.
- ▶ Utilice el electrodo únicamente con el dispositivo para ECG Bittium Faros™.
- ▶ El dispositivo Faros y el adaptador OmegaSnap se deben limpiar de un usuario a otro. Método de limpieza recomendado: toallitas desinfectantes y de limpieza sin alcohol para productos sanitarios, por ejemplo, toallitas mikrozid® sensitive o SaniCloth AF3.
- ▶ Siga estas instrucciones. Consulte instrucciones más detalladas en el manual de Faros.

Bittium



Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio, FINLANDIA




Tel.: +358 (0)40 3442000
Correo electrónico: bbs@bittium.com, o bien
medical.support@bittium.com


www.bittium.com

Electrodo para ECG de 1 derivación Bittium MiniSnap™ Sensitive

Guía rápida

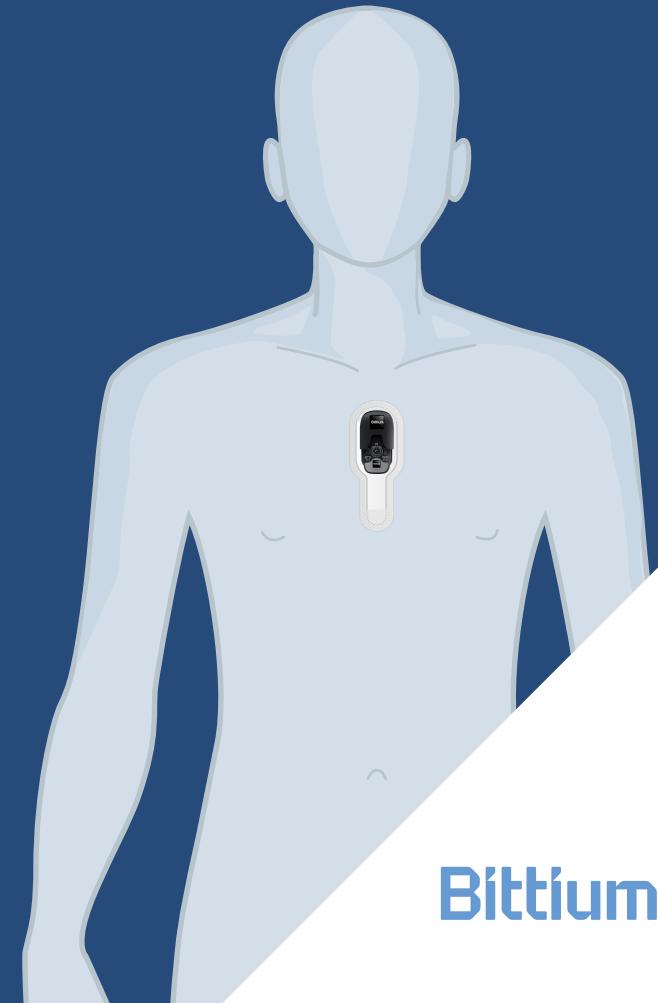


Bittium

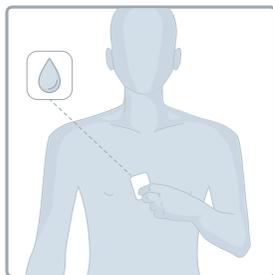

1.



Limpie la piel según le indique el personal del centro médico o la persona responsable del tratamiento. La piel debe estar limpia y seca cuando se vaya a colocar el electrodo. En caso necesario, retire el exceso de vello con una cuchilla o una afeitadora eléctrica.

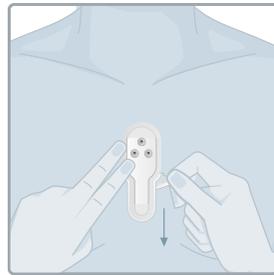

5.


Cuando la parte superior del electrodo esté bien colocada, retire el recubrimiento (marcado con el número 2) de la parte inferior y coloque el resto del electrodo sobre la piel.

2. Asegúrese de que el envase del electrodo no esté abierto y compruebe la fecha de caducidad. Rasgue el envase para abrirlo y extraiga el electrodo.

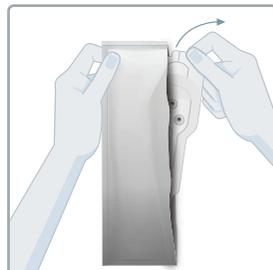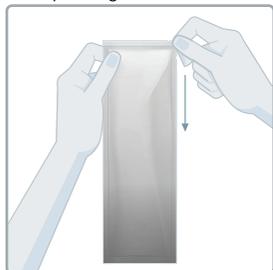


6.

Asegúrese de que la superficie del dispositivo Faros y del adaptador OmegaSnap no presenten daños*. Conecte el dispositivo al adaptador. Para garantizar una buena conexión, apriete el dispositivo y el adaptador juntos con el pulgar y el índice. Conecte el adaptador al electrodo. Presione el dispositivo contra el electrodo para garantizar que los botones a presión se conecten.

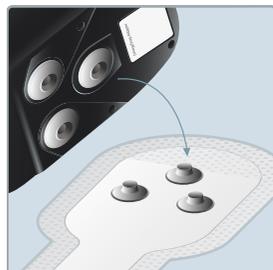


4.

Fije el electrodo a la piel. Coloque la parte superior del electrodo aproximadamente a una distancia de dos dedos bajo la horquilla esternal. Una calidad de señal óptima se obtiene cuando el electrodo se coloca completamente sobre el tórax y la parte inferior del electrodo está claramente sobre el diafragma.

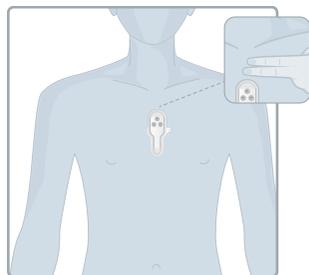


7.

Pulse y suelte el botón de encendido para empezar a medir. Un sonido y una luz verde parpadeante indican que la medición ha comenzado.


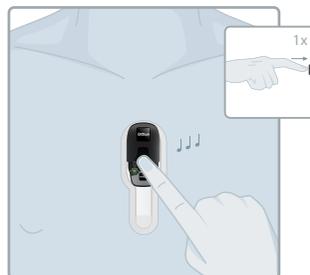


8.

Cuando desee detener la medición, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 8 segundos. El dispositivo pitará tres veces y la luz parpadeante se apagará.

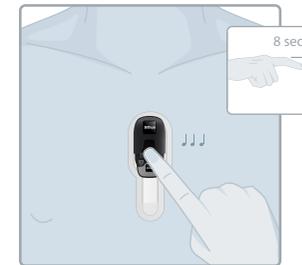

9. Retire el electrodo de la piel despegando un borde del parche y, luego, tirando suavemente del resto del parche. Puede utilizar agua jabonosa suave, si es necesario. Deseche el electrodo utilizado según la normativa local de gestión de residuos. Devuelva el dispositivo para ECG Faros y el adaptador OmegaSnap a su centro médico o persona responsable del tratamiento.

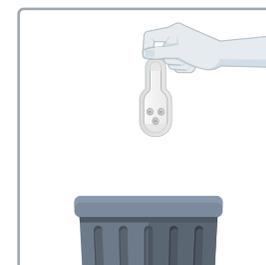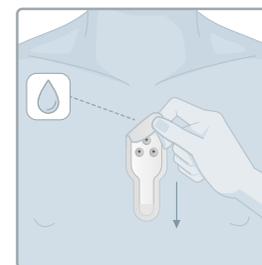

Símbolos

Marca CE	No reutilizar
Fecha de fabricación	Número de lote
Fabricante	Fecha de caducidad
Seguir instrucciones de uso	Solo uso con receta**
Producto sanitario	